

bobo-test®

PŁYTKOWY

DOMOWY TEST CIĄŻOWY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU O CZUŁOŚCI 25 mIU/ml.

Wyrób do samodzielnego zastosowania. Test do diagnostyki in vitro.

PRZED PRZEPROWADZENIEM TESTU CIĄŻOWEGO NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA.

BOBO-TEST to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciąży do domowego użytku.

Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu.

Test można stosować już po 10 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu.

Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

Przed przeprowadzeniem testu:

- Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na **bezpłatną infolinię: 0 800 70 30 11** w godz. 8-16 (pn-pt).
- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego).
- Test należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Nie wolno zamrażać testu.
- Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny w temperaturze pokojowej.
- Test należy chronić przed dziećmi.
- **Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.**

Jak działa test?

Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu HCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak. Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność HCG już przy stężeniu 25 mIU/ml.


Zawartość opakowania testu

W opakowaniu testu Bobo Test znajduje się:

1. Instrukcja użycia
2. Płytką testową
3. Pipetką



pipetka

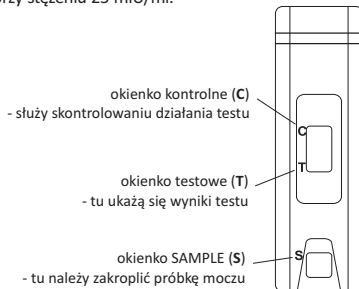

Uwaga: wewnątrz torebki foliowej znajduje się szaszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić.

Sposób użycia

1. Zanim przeprowadzisz test zbierz próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku.
2. Wyjmij foliową torebkę z opakowania testu.
3. Rozewnij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę.
4. Zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu.
5. Ściskając szeroką część pipetki nabierz próbkę moczu.
6. Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieść w nim 3-4 krople moczu. Uważaj, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza.
7. Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test.

UWAGA: Jeżeli w oknie testowym pojawia się tylko linia kontrolna C (brak ciąży), to po okresie dłuższym niż 5 minut nie należy odczytywać wyniku, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu.

Interpretacja wyników testu

Wynik pozytywny ciąża

Jeżeli w okienku kontrolnym (C) oraz w okienku testowym (T) pojawiły się linie (nawet jeżeli któraś z linii jest mniej wyraźna) oznacza to, że jesteś w ciąży.

Wynik negatywny brak ciąży

Jeżeli linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży.


Wynik nieważny

Wynik uznajemy za nieważny jeśli w ciągu 5 minut:


1. Pojawi się linia tylko w okienku testowym (T) i nie pojawi się w oknie kontrolnym (C)
2. Nie pojawi się żadna linia w oknie testowym (T) oraz w oknie kontrolnym (C)

W obu przypadkach wynik uznajemy za błędny, a test należy powtórzyć przy użyciu nowego zestawu testującego



Odczyt wyniku

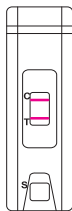

ciąża

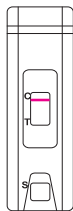

brak ciąży

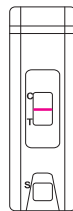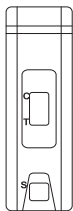

wynik nieważny

Odpowiedzi na ewentualne pytania

Jak wiarygodny jest Bobo Test?

Wiarygodność testu wynosi ponad 99% i odpowiada wiarygodności testu laboratoryjnego.

Kiedy należy przeprowadzić test?

Test jest w stanie wykryć już 6-dniową ciążę, jednakże ze względu na możliwość naturalnego poronienia we wczesnym etapie ciąży, najlepiej wykonać test pierwszego dnia spodziewanej miesiączki. Największe stężenie hormonu HCG występuje zazwyczaj w moczu porannym, jednak wysoka czułość Bobo-Testu pozwala na jego przeprowadzenie o dowolnej porze dnia.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na wynik testu?

Jeżeli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcją użycia, wynik testu powinien być dokładny. Jednak pewne leki zawierające hormon HCG i niezwykle rzadko występujące choroby mogą fałszować wynik testu. Spożycie alkoholu, przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, leków przeciwbólowych lub antybiotyków nie ma wpływu na wynik testu.

Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest pozytywny?

Jeżeli wynik testu jest pozytywny powinnaś skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Możesz potwierdzić test robiąc go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiętaj, odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ciąży jest ważne, aby zapewnić zdrowie dziecka i matki.

Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest negatywny?

Negatywny wynik testu oznacza, że hormon HCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeżeli miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni, powinnaś powtórzyć test. Możliwe, że źle wyliczyłaś dzień rozpoczęcia miesiączki.

Czy wynik testu może się zmienić po pewnym czasie?

Pozytywny wynik testu (ciąża) nie zmienia się nawet kilka dni po wykonaniu testu.

Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami.

Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

15°C - 30°C	Temperatura przechowywania		Przeczytaj instrukcję
	Numer serii		Do jednorazowego użyciu
	Data ważności		Do diagnostyki in vitro - do użyciu zewnętrznego
	Producent / Wytwórca		Numer katalogowy
	Autoryzowany przedstawiciel w UE		Data ostatniej weryfikacji
	Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu		Chronić przed wilgocią
	Chronić przed światłem słonecznym		

Przechowywać w temp. 15-30°C.
Numer serii i data ważności
na opakowaniu i etykiecie.

Diagnosis Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok, Polska
Bezpłatna infolinia: 0 800 70 30 11
www.diagnosis.pl

