

nazwa **HemoActive – profilaktyka chorób jelita grubego**

producent: **Diagnosis**

cena: **19,99 zł**



HemoActive - prosty test domowego użytku, umożliwiający wykrycie krwi utajonej w kale – jednego z objawów raka jelita grubego

HemoActive jako jedyny test w Polsce posiada rekomendację Polskiego Komitetu Zwalczenia Raka oraz Amerykańskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem

Dokładny - test zapewnia wysoką dokładność wykrycia krwi utajonej w kale (zgodnie z normami ISO i CEN obowiązującymi w U.E.)

Łatwy w użyciu - w celu jego przeprowadzenia wystarczy wrzucić bibułę testową do muszli klozetowej

Szybki - wynik jest prosty w interpretacji, jeśli jest obecna krew utajona w kale, w ciągu 2 min. test zabarwi się na kolor niebiesko-zielony

Higieniczny - nie wymaga zbierania kału

Komfortowy - nie wymaga stosowania diety

Ekonomiczny - zawiera pięć bibulek testowych (3 do wykonania pełnego testu oraz 2 dla potwierdzenia poprawności jego wykonania)

□

Każdy z nas po 50 roku życia powinien przynajmniej raz w roku wykonać badanie na krew utajoną w kale, w celu stwierdzenia czy nie dochodzi do krwawienia z przewodu pokarmowego. Jest ono najczęstszym (76%) z objawów nowotworu jelita grubego.

Wczesne wykrycie choroby jest podstawowym warunkiem skutecznego leczenia. Jednym z badań prowadzących do rozpoznania choroby jakie zleca lekarz, jest badanie na krew utajoną w kale. Jest to krew, która w wyniku krwawienia, wraz z treścią przeszła przez przewód pokarmowy, ale nie jest widoczna w stolcu „gołym okiem”. Badanie wydaje się być krępujące, jednak to dzięki niemu można wcześniej zdiagnozować zmiany nowotworowe.

Wykonanie testu **HemoActive** nie wymaga stosowania specjalnej diety ani zbierania kału. Aby go przeprowadzić wystarczy jedynie wrzucić bibulkę testową do muszli klozetowej. Wynik jest prosty w interpretacji - jeśli jest obecna krew w kale, w ciągu 2 minut test zabarwi się na kolor niebiesko-zielony. Jest to oznaka, że należy skontaktować się z lekarzem i przeprowadzić szczegółowe badania diagnostyczne w kierunku raka jelita grubego.

Każde opakowanie **zawiera 5 bibulek testowych**, proszek kontrolny potwierdzający poprawne wykonanie testu, kartę wyników oraz dokładną instrukcję użycia.

Test **HemoActive** został przebadany klinicznie, aby zapewnić wiarygodną i dokładną wykrywalność krwi w kale, zgodną z normami ISO i CEN obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ponadto, jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ podlega całkowitej biodegradacji.

□

więcej informacji o produkcie na stronie:

www.diagnosis.pl

□