



nazwa [HelicobacterPylori – zakażenia układu pokarmowego](#)

producent: **Diagnosis**

cena: **29.99 zł**

**Helicobacter pylori** (H. pylori) jest bakterią bytującą w błonie śluzowej żołądka, mogącą pozostawać w żołądku do końca życia pacjenta. Do zakażenia bakterią H. pylori dochodzi zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie. Zakażenie to przebiega najczęściej bezobjawowo. Może być ono przyczyną rozwoju stanów zapalnych żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy a nawet raka żołądka.

□

**Diago-HP** test wykrywa specyficzne przeciwciała wytworzone w organizmie człowieka w odpowiedzi na zakażenie bakterią H. pylori.

**Diago-HP** test ma na celu wykazanie obecności specyficznych przeciwciał bakterii H. pylori we krwi. Jeżeli przeciwciała są obecne w organizmie to wynik testu będzie pozytywny.

Należy pamiętać, że wykonanie testu Diago-HP jest jedynie wstępnym etapem diagnostyki schorzeń układu pokarmowego.

### Sposób wykonania testu:

1. Umyć ręce. Rozerwać ,wyjąć test i pipetę.
2. Przetrzeć palec, z którego będzie pobierana krew wacikiem nasączonym alkoholem dołączonym do opakowania.
3. Nakłuć palec lancetem.
4. Pobrać krew do pipety. Krew sama wpłynie do pipety. Wypełnić pipetę krwią do zaznaczonej linii.
5. □ Nanieść próbkę krwi do zagłębienia oznaczonego „S” .
6. Po wprowadzeniu krwi do zagłębienia należy odczekać 90 sekund.
7. Odkręć nakrętkę pojemnika z roztworem testowym. Powoli wprowadź pięć 5 kropli roztworu do zagłębienia na bufor, zaznaczonego na teście „D”.
8. Odczytać wynik testu dokładnie w 15 minucie

**Interpretacja wyniku testu:**

- **Wynik testu pozytywny** - oznacza to, że w próbce krwi są obecne specyficzne przeciwciała anti-Helicobacter pylori. Wskazuje to na istniejące lub niedawno przebyte zakażenie bakteriami Helicobacter pylori. Należy skontaktować się z lekarzem w celu potwierdzenia wyników i ustalenia sposobu leczenia.
- **Wynik testu negatywny** - oznacza to, że w próbce krwi nie są obecne specyficzne przeciwciała anti-Helicobacter pylori.

Zakażenie bakteriami Helicobacter pylori można prawie wykluczyć. Jednak w przypadku występowania dolegliwości brzusznych i dalszego złego samopoczucia lub w przypadku występowania objawów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia należy również skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia dalszych testów i uzyskania ostatecznej diagnozy.

**Zawartość opakowania testu :**

- płytkę testową i pipetę
- fiolka roztworu testującego
- jałowa igła automatyczna do nakłucia palca
- wacik nasączony alkoholem

**więcej informacji o produkcie na stronie:**

[www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)

□