



nazwa **Optilets 50szt.**

producent: **Diagnosis**


cena: **12.99 zł**

Jednorazowe sterylne lancety do punktowego nakłuwania skóry w celu pobrania próbki krwi kapilarnej

do użytku z nakłuwaczem OPTILET


Instrukcja użycia

1. umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz
2. wybierz miejsce nakłucia
3. usuń nasadkę zabezpieczającą (rys.1 i 2)
4. wprowadź lancet do nakłuwacza, wykonaj nakłucie
5. wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia
6. załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika

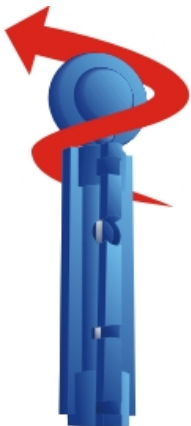

**1. PRZEKRĘĆ  
NASADKĘ**

□ □

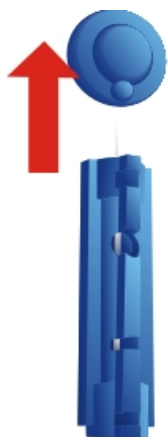

**2. ZDEJMIJ  
NASADKĘ**

**NIE NALEŻY PONOWNIE UŻYWAĆ LANCETU.**

Użycie ponowne tej samej igły przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego. **"więcej informacji o produkcie na stronie: [www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)"**