

nazwa **Optilets 100szt.**

producent: **Diagnosis**

cena: **21.99 zł**




Jednorazowe sterylne lancety do punktowego nakłuwania skóry w celu pobrania próbki krwi kapilarnej

do użytku z nakłuwaczem OPTILET


Instrukcja użycia

1. umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz
2. wybierz miejsce nakłucia
3. usuń nasadkę zabezpieczającą (rys.1 i 2)
4. wprowadź lancet do nakłuwacza, wykonaj nakłucie
5. wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia
6. załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika

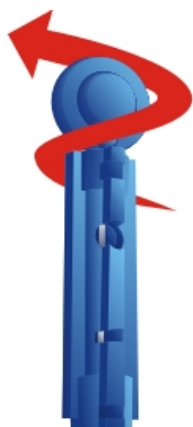

**1. PRZEKRĘĆ
NASADKĘ**

□ □

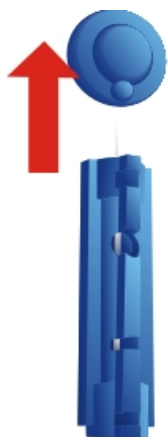

**2. ZDEJMIJ
NASADKĘ**

NIE NALEŻY PONOWNIE UŻYWAĆ LANCETU.

Użycie ponowne tej samej igły przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego. **"więcej informacji o produkcie na stronie: www.diagnosis.pl"**