

nazwa **ABRA płyn kontrolny NORMAL**

producent: **Diagnosis**

cena: **15.99 zł**



Płyn kontrolny ABRA jest wodnym roztworem glukozy z niewielką zawartością składników obojętnych chemicznie oraz barwnika spożywczego, przeznaczonym do sprawdzania dokładności pomiaru Zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi ABRA. Test z płynem kontrolnym wykonujemy w celu stwierdzenia, że: glukometr i paski testowe ABRA funkcjonują prawidłowo podawane przez glukometr wyniki są wiarygodne

W ofercie dostępny jest ABRA PŁYN KONTROLNY NORMAL

**ZASTOSOWANIE** Roztwór kontrolny to wodny roztwór glukozy z niewielką ilością składników niereaktywnych i barwników spożywczych do weryfikacji dokładności Zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Roztwór kontrolny sprawdza działanie glukometru, paska testowego i techniki pracy użytkownika. **KIEDY WARTO PRZEPROWADZIĆ TEST Z ROZTWOREM KONTROLNYM**

1. Kiedy używasz glukometru po raz pierwszy.
2. Kiedy używasz nowej partii pasków testowych.
3. Za każdym razem, gdy masz wątpliwości odnośnie funkcjonowania urządzenia lub regularnie, aby upewnić się co do dokładności (np. raz w tygodniu).
4. Kiedy ustalasz plan brania leków na cukrzycę.
5. Kiedy wynik testu poziomu glukozy jest niższy lub wyższy niż poziom normalny.

**SKŁAD ROZTWORU KONTROLNEGO** Każdy roztwór kontrolny to zbuforowany, ustabilizowany wodny roztwór glukozy (o pożądanej zawartości glukozy) zawierający środki konserwujące i inne składniki niereaktywne. Roztwór został spreparowany w taki sposób, aby reagować równoważnie próbce krwi pełnej, zawierającej w przybliżeniu 44,79 lub 220 mg/dL glukozy. Zakresy (zależne od partii) są nadrukowane na etykiecie fiolki. **"więcej informacji o produkcie na stronie:**

[www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)"