

INSTRUKCJA UŻYWANIA

SZANOWNY KLIENCIE!

Dziękujemy za zakup termometru elektronicznego Diagnostic T-01. Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru temperatury ciała dzieci i osób dorosłych. Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję użycia.

⚠ OSTRZEŻENIA:

- Przed użyciem termometru elektronicznego dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Ryzyko uduszenia: Nasadka i bateria mogą spowodować uduszenie w razie połknięcia. Nie pozwól, aby dzieci użytkowały to urządzenie bez nadzoru rodziców.
- Nie umieszczaj termometru w uchu. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w jamie ustnej, odbycie i pod pachą.
- Nie narażaj baterii termometru na bardzo wysokie temperatury, gdyż może grozić wybuchem.
- Zaleca się kontrole pracy urządzenia co 2 lata (Serwis Diagnostis).
- Wyciągnij baterię z urządzenia jeżeli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Wykorzystywanie odczytów temperatury do samodzielnej diagnozy jest niebezpieczne. W celu interpretacji wyników skonsultuj się z lekarzem. Samodzielna diagnoza może doprowadzić do pogorszenia aktualnego stanu pacjenta.
- Nie wykonuj pomiarów gdy termometr jest mokry, gdyż wyniki mogą być wówczas niedokładne.
- Nie gryź termometru. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie próbuj rozmontowywać, ani naprawiać termometru. W przeciwnym razie wyniki mogą być niedokładne.
- Po każdym użyciu zdezynfekuj termometr, szczególnie gdy jest on używany przez więcej niż jedną osobę.
- Nie wciskaj termometru na siłę do odbytnicy. Przerwij wkładanie i przerwij pomiar jeżeli poczujesz ból. W przeciwnym razie może dojść do urazu.
- Nie używaj termometru w jamie ustnej bezpośrednio po użyciu w odbytnicy.
- W przypadku dzieci w wieku 2 lat i poniżej, nie należy stosować termometru doustnie.
- Jeśli termometr był przechowywany w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 40°C, w takim przypadku przez około 15 minut przed dokonaniem pomiaru wyrób należy pozostawić w temperaturze otoczenia 5-40°C.

Termometr elektroniczny zapewnia szybki i bardzo precyzyjny pomiar temperatury ciała u osób w różnym wieku. Możliwe metody pomiaru: pod pachą, w jamie ustnej oraz w odbycie. Wyrób jest wielokrotnego użytku i może być stosowany zarówno w warunkach domowych jak i szpitalnych. W razie pytań dotyczących sposobu korzystania z urządzenia lub zgłoszenia nieprzewidzianych zdarzeń, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu wskazanym w instrukcji.

BUDOWA TERMOMETRU



1. Sonda 3. Włącznik/wyłącznik (ON/OFF)
 2. Wyświetlacz 4. Pokrywa baterii

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 termometr, 1 instrukcja użytkowania, 1 plastikowe etui, bateria

⚠ OSTRZEŻENIA:

- Wydajność urządzenia może spaść w razie wystąpienia jednego lub więcej poniższych czynników:
- Praca urządzenia poza dopuszczalną temperaturą i wilgotnością.
 - Przechowywanie urządzenia poza dopuszczalną temperaturą i wilgotnością.
 - Wstrząs mechaniczny (np. upuszczenie) lub zniszczoną sondę.

- Temperatura pacjenta poniżej temperatury otoczenia.
- Przenośny i ruchomy sprzęt komunikacyjny RF może zaburzyć funkcjonowanie urządzenia. Urządzenie wymaga specjalnych środków ostrożności odnośnie zgodności elektromagnetycznej (EMC), zgodnie z informacjami dostarczonymi w dokumentacji urządzenia.

DANE TECHNICZNE


Typ	Termometr elektroniczny
Zakres	32,0-42,9°C (86,6-109,2°F)
Dokładność	±0,1°C (0,2°F) przy pomiarze 35,5-42,0°C (95,9-107,6°F); ±0,2°C (0,4°F) przy pomiarze do 35,5°C (95,9°F)
Ekran	Ekran ciekłokrystaliczny, 3 i 1/2 cyfry
Pamięć	Zapis ostatniego wyniku pomiaru
Bateria	Jedna bateria 1,5 V DC (rozmiar LR41 lub SR41, UCC 392)
Czas pracy baterii	ok. 200 godzin
Wymiary	12,4x1,8x0,9 cm (DxSzxW)
Waga	ok. 10 g z baterią
Warunki użytkowania	Temperatura: 5-40°C (41,0-104,0°F) Wilgotność względna: 15-95% RH Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura: -20-55°C (-4,0-131,0°F) Wilgotność względna: 15-95% RH Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa
Klasyfikacja IP	IP 22 - Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej. Ochrona przed kroplami wody przy wychyleniu o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę.
Klasyfikacja	Typ BF I
Czas życia wyrobu	3 lata

WYBÓR JEDNOSTKI TEMPERATURY °C LUB °F


Pomiar temperatury jest możliwy w skali Celsjusza lub Fahrenheita (°C lub °F). W celu zmiany jednostki temperatury należy przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF przez około 4 sekundy.

DOKONYWANIE POMIARU


1. Wciśnij włącznik / wyłącznik znajdujący się obok ekranu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy; wyświetli się (Rys.1), a następnie wynik ostatniego pomiaru. Po wyświetleniu temperatury automatycznego testu, termometr będzie w trybie pomiaru. Symbol Lo z migającym °C lub °F wskazuje na gotowość do pomiaru (Rys. 2/3).

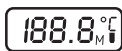

Rys.1

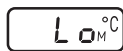

Rys.2

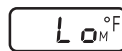


Rys.3

UWAGA: Jeżeli zmierzona temperatura będzie poniżej 32°C lub 90°F, na ekranie wyświetli się "Lo". Jeżeli zmierzona temperatura będzie wyższa niż 42,9°C lub 109,9°F, na ekranie wyświetli się "Hi".

2. Umieść termometr w wybranym miejscu (jama ustna, odbytnica, pachy).

- **JAMA USTNA:** Umieść termometr pod językiem, jak pokazano na ilustracji obok. Zamknij usta i oddychaj równo przez nos, aby wdychane i wydychane powietrze nie zaburzyło pomiaru. Prawidłowy zakres temperatury pomiędzy 35,7 a 37,3°C (96,3-99,1°F)

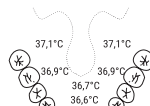

- **ODBYTNICA:** Posmaruj końcówkę termometru wazeliną, aby ułatwić umieszczenie. Delikatnie włoż sondę na głębokość około 1 cm (mniej niż 1/2") do odbytnicy. Prawidłowy zakres temperatury pomiędzy 36,2 a 37,7°C (97,2-99,9°F).
- **PACHA:** Wytrzyj pachę. Umieść sondę pod pachą i trzymaj ramię mocno przyciśnięte do boku. Prawidłowy zakres temperatury pomiędzy 35,2 a 36,7°C (95,4-98,1°F).

UWAGA: Jeśli wynik pomiaru jest poza prawidłowym zakresem temperatury, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

3. Znak stopnia miga podczas całej procedury testowej. Gdy znak przestanie migać, włączy się sygnał dźwiękowy, który trwa około 10 sekund. Jednocześnie na ekranie wyświetli się odczyt. Bezwzględnie należy zachować minimalny czas pomiaru (do pojawienia się sygnału dźwiękowego). Pomiar jest kontynuowany nawet po wyłączeniu sygnału dźwiękowego. Wyświetlana temperatura nie zmienia się po wyjęciu termometru z miejsca pomiaru.

UWAGA: Aby uzyskać lepszy wynik pomiaru temperatury ciała, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, zaleca się utrzymanie sondy przez kolejne 2 minuty przy pomiarze w ustach lub w odbyciu a przy pomiarze pod pachą przez kolejne 5 minut. Należy zachować co najmniej 30-sekundowy odstęp między pomiarami.

UWAGA: Normalny sygnał dźwiękowy wydaje dźwięki – "Bi-Bi-Bi-Bi"; Dźwięki alarmu są szybsze po osiągnięciu i przekroczeniu temperatury 37,8°C (100°F); wówczas jest to "Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi"

4. Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii, wciśnij włącznik / wyłącznik, aby wyłączyć termometr po każdym pomiarze. Jeżeli urządzenie pozostanie bezczynne przez około 10 minut, wyłączy się automatycznie.

5. Przechowuj termometr w opakowaniu ochronnym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Komunikat o bledzie	Problem	Rozwiązanie
	Temperatura pomiaru jest niższa niż 32,0°C (90,0°F)	Wyłącz termometr. Oczekaj minutę i ponownie dokonaj pomiaru temperatury.
	Temperatura pomiaru jest wyższa niż 42,9°C (109,9°F)	Wyłącz termometr. Oczekaj minutę i ponownie dokonaj pomiaru temperatury.
	Urządzenie nie działa poprawnie.	Wymij baterie, odczekaj 1 minutę i włóż ją ponownie. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się ze sprzedawcą.
	Rozładowana bateria: ikona baterii miga, nie można dokonać pomiaru.	Wymień baterie.

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z tym wyrobem, należy zgłosić Producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym osoba zgłaszająca ma miejsce zamieszkania.

WYMIANA BATERII

1. Gdy w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się znak , wymień baterie.

2. Pociągnij pokrywę baterii jak pokazano na (Rys. 4).

3. Delikatnie wyciągnij plastikową płytkę z komorą baterii około 1 cm (trochę mniej niż 1/2") (Rys. 5)

4. Aby wyjąć baterię użyj spiczastego przedmiotu (np. długopisu). Usuń baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieść nową baterię 1,5V DC LR41 lub SR41, UCC392 lub podobnego typu. Upewnij się, że bieguny baterii są ułożone prawidłowo, biegunem (+) ku górze. (Rys. 6)

5. Wsuń komorę baterii z powrotem na miejsce i załóż pokrywę.



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6

KALIBRACJA

Producent zaleca sprawdzanie dokładności termometru w autoryzowanym serwisie co 2 lata.


CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Wytrzyj termometr miękką i czystą szmatką. W przypadku uciążliwych zabrudzeń, wytrzyj termometr szmatką zwilżoną w wodzie lub obojętnym roztworze detergentu. Na koniec wytrzyj miękką i suchą szmatką. Do dezynfekcji można użyć 75% etanolu lub alkoholu izopropylowego. Aby nie dopuścić do uszkodzenia termometru, stosuj się do poniższych instrukcji.

- Do czyszczenia termometru nie używaj benzenu, rozcieńczalnika, benzyny ani żadnych innych silnych rozpuszczalników.
- Nie zanurzaj czujnika w alkoholu przez dłuższy czas, ani nie próbuj sterylizować go gorącą wodą (temperatura 50°C (122°F) i wyższa).
- Nie czyść termometru metodą ultradźwiękową.

INFORMACJE NA TEMAT ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

<http://www.diagnosis.pl/normy/termometry>

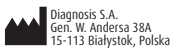

SERVIS GŁÓWNY DIAGNOSIS S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45,
serwis@diagnosis.pl

pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

Termometr T-01

NAZWA URZĄDZENIA DATA SPRZEDAŻY NUMER FABRYCZNY

WARUNKI GWARANCJI

- Diagnosis S.A. udziela gwarancji:
 - 24 miesiące na termometr Diagnostic T-01. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni. Termin liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.
 - Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku gdy:
 - naprawa nie została wykonana w terminie określonym w pkt. 1,
 - uprawniony punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia,
 - w okresie gwarancji wykonane zostały 4 naprawy, a sprzęt nadal wykazuje wady, uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.
- Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.
- Gwarancja nie są objęte: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem fabrycznym, wyroby z zerwaną plombą gwarancyjną, uszkodzenia powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania, dostanie się do wnętrza płynów lub ciał obcych, przepięcia w sieci zasilającej, naprawy przez osoby niepowołane oraz zdarzeń losowych.
- Wadliwy sprzęt nabywca powinien dostarczyć pod adres serwisu głównego: Diagnosis S.A., 16-010 Wasilków, ul. Przemysłowa 8.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Jedyną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży, pieczętką i podpisem sprzedawcy. Karta nie wypełniona, zła wypełniona, ze sładami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna w skutek zniszczenia – jest nieważna.

ADNOTACJE PUNKTU SERWISOWEGO

lp.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Gwarancja przedłożona do	Opis czynności	Pieczętka i podpis wykonawcy

	Producent		Data produkcji
	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użycia		Rev. Data ostatniej aktualizacji
	Ostrzeżenia		Numer katalogowy
	Numer partii produkcyjnej		Prąd stały
	Limit wilgotności		Limit ciśnienia atmosferycznego
	Chronić przed wilgocią		Trzymać z dala od promieni słonecznych
	Wyrób medyczny		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Ograniczenie temperatury		Klasyfikacja IP - oznacza stopień ochrony zapewniany przez obudowę zgodnie z wymaganiami normy IEC 60529
	Typ bezpieczeństwa BF - urządzenie zostało tak zaprojektowane aby zapewnić użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo przy dokonaniu pomiaru.	Zużyty wyrób i baterie oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Jeśli masz wątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z firmą Diagnosis.	

Infolinia
czymna: poniedziałek-piątek
w godzinach: 8.00-16.00

+48 800 70 30 11 dla telefonów stacjonarnych połączenie bezpłatnie
+48 85 874 69 28 dla telefonów komórkowych (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)

Diagnosis S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
info@diagnosis.pl
www.diagnosis.pl



REF 5011